


## 4 輪組立手順書 (超小型)


・梱包時の全内容物

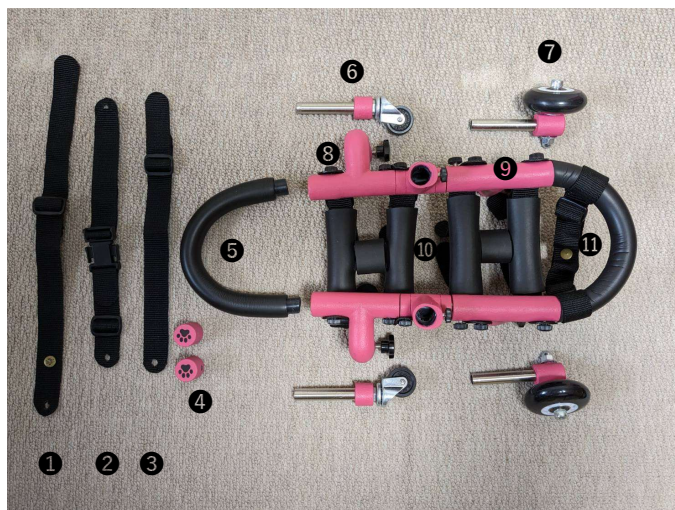

- ① 胸当てベルト
- ② 胴回りベルト上 (バックル付き)
- ③ 胴回りベルト下
- ④ フレームキャップ
- ⑤ アーム
- ⑥ 前輪タイヤ
- ⑦ 後輪タイヤ
- ⑧ 4輪前方パーツ
- ⑨ 本体
- ⑩ 前・後足用ベルト
- ⑪ 足乗せベルト
- ⑫ ノブボルト
- ⑬ 化粧ビス



4輪時で使用

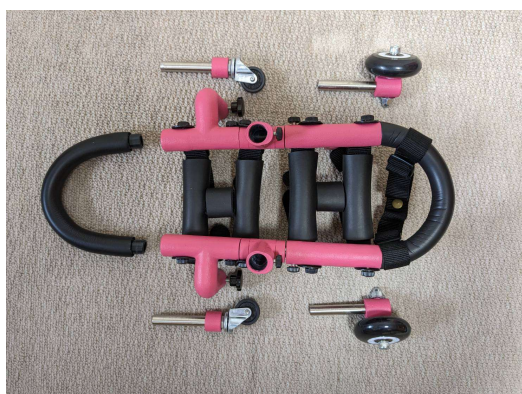

2輪時で使用 (保管をお願いします)



ベルトは取り付けていますので前輪・後輪・アームを取り付けるだけです。

(1) 本体と4輪前方パーツに前輪と後輪を取り付けます。

- ・車輪を取り付けるフレームについているノブボルト⑫を緩め、車輪のステンレス部分を差し込み
- ⑫ノブボルトを締めて固定します。車輪はステンレス部分に赤色がついているのが右。青色は左です。ステンレス部分の色面 (赤・青) をノブボルトの位置に合わせて取り付けてください。




赤色は右  
青色は左



## (2)アームを取り付けます

- ・アーム⑤を取り付ける穴の後ろにある化粧ビス⑬を緩め、ねじ穴を合わせアームを差し込みます。  
両方しっかりと差し込みが完了したら、化粧ビス⑬をしっかりと締めます。  
(注) 穴の位置を確認し合わせてください。

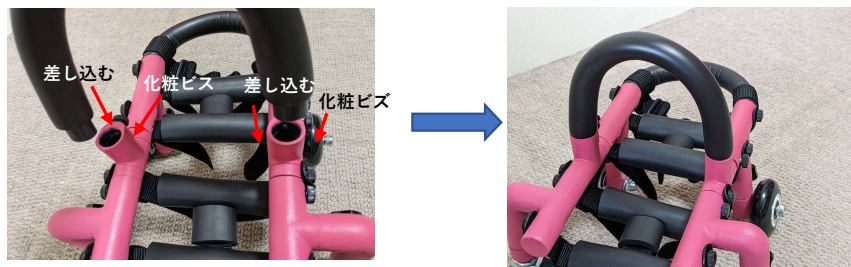

## (3)完成です



- \* 本体後方のU字フレームについているベルトは足乗せベルト⑪です。  
取り外しが可能です。  
お散歩で足を引きずるようであれば乗せてあげてください。