


首置き取り付け手順書



・梱包時の全内容物

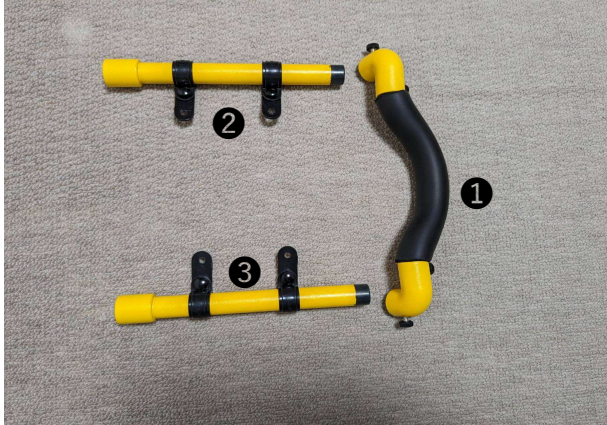

- ①首置き
- ②首置き支えフレーム左
- ③首置き支えフレーム右

(1)首置きの角度を調整します。(水平/斜45度/真下の3パターン)


- ・愛犬の首の長さ垂れ具合に合わせ調整してください。
- 化粧ビス⑭を外し下記状態にします。
- 化粧ビス⑭を外し下記状態にします。

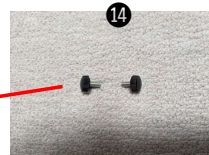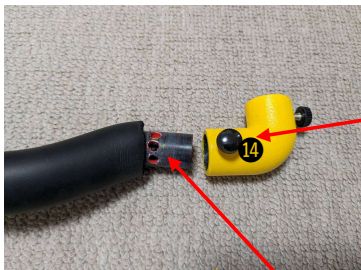

⑭化粧ビス



穴が3つ開いています。
調整したい角度に合わせて化粧ビスで留めてください。
左右同じようにお願いします。

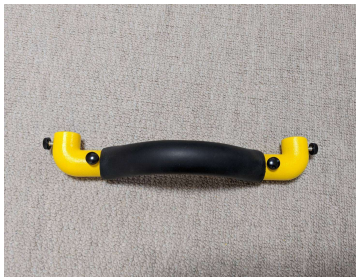



(2)首置き支えフレーム左/右②③を取り付けます。(左右同様)

- ・前足用ベルト (H型) の前方の化粧ビス①とアーム前にある化粧ビス②を外し
首置き支えフレームにある③の吊るしベルトと前足用ベルト (H型) の穴を合わせ
化粧ビスで留め元に戻します。また後方の吊るしベルト③も②の穴に化粧ビスで留め元に戻します。



(3)首置き①を首置き支えフレーム②③の先端に取り付けます。

・首置き①を首置き支えフレーム②③の先端に差し込み、化粧ビス⑭で留めます。

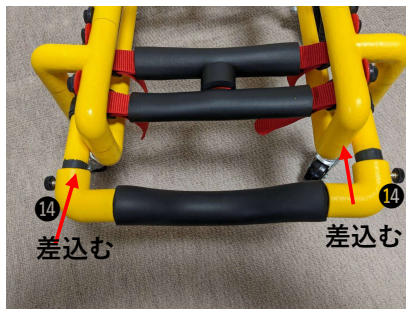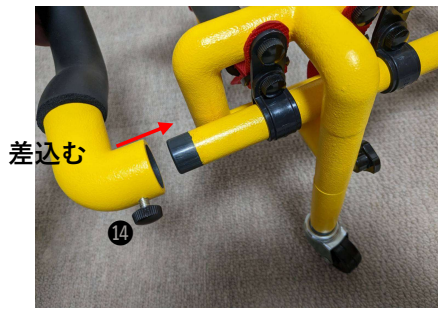

(4)完成です。



柔らか目のプラスチック素材です。

・ゆっくりと前後にずらせて
長さの調整ができます。

・水平／斜45度／真下の3パターンに角度の調整ができます。
(取り外し可能)